

江西省 2021 年第 1 次临床细菌学室间质量评价

活动安排及注意事项

本年度第 1 次活动安排如下：

1. 本次活动细菌鉴定 5 株菌，请予 月 日检测， 月 日-前回报我“中心”。
2. 药物敏感实验 1 株，请各实验室按照有关资料正确操作。可使用纸片法，也可使用 MIC 法。
3. 菌株鉴定结果进行评分；部分药物（药物名称后打*）列入评分，其他药物均需填报。
4. 请在规定时间内登陆我中心网站仔细填报相关内容。
5. 如在菌种鉴定中发现有特殊耐药株出现，请在鉴定报告表中细菌评价栏中填入该菌的特点（如 CRE）。

2021 年第 1 次临床细菌学室间质评质控标本资料

标本号	标本来源	诊断	鉴定	药物敏感实验
2101	腹水	慢性肾功能衰竭	√	
2102	血液	肺部感染	√	
2103	宫颈拭子	尿道炎	√	
2104	大便	腹泻	√	
2105	灌洗液 (BALF)	慢阻肺	√	√

标本保存及处理方法：请收到标本后，立即放置在-20℃或更低温度的低温冰箱或普通家庭冰箱冰格内保存。检测时，请用灭菌新鲜牛肉汤或无菌小牛血清或新鲜羊血，每支加入 0.1ml 左右，待融解均匀后至待种平板少许，分区划线。请分离并鉴定主要致病菌。

江西省临床检验中心

二〇二一年四月

江西省临床检验中心临床微生物室间质量评价结果报告单

实验室编号：

医院名称：

第一次检测日期：2021年 月 日

完成日期：2021年 月 日

2105号菌药物敏感实验结果报告单

抗生素名称	纸片法剂量 ($\mu\text{g/ml}$)	抑菌环直径 (mm)	结 果 (S、I、R)	药敏纸片生产厂家	MIC法结果 ($\mu\text{g/ml}$)
氨苄西林*					
头孢唑啉*					
庆大霉素*					
复方新诺明*					
环丙沙星*					
阿米卡星					
头孢他啶					
头孢呋辛					
头孢曲松					
氨苄西林/舒巴坦					
亚胺培南					
氯霉素					
左氧氟沙星					

药敏试验培养基名称：

药敏培养基生产厂家：

实验者签名：

科主任签名